

# ISMERJE MEG A FLOCARE INFINITY III TÁPLÁLÓPUMPA KEZELŐFELÜLETÉT!



## BEKAPCSOLÁS ELŐTT - Mit találunk a pumpán?



### Pumpa állapotjelző

A pumpa állapotjelzője vizuálisan jelzi a pumpa aktuális állapotát.

- ∞ A **zöld fény** azt jelzi, hogy a pumpa működési módban van, és megfelelően működik.
- ∞ A **narancssárga fény** azt jelzi, hogy a pumpa szünet üzemmódban van, és a felhasználói utasításra vár.
- ∞ A **piros fény** riasztási állapotot jelez; azonnali intézkedésre van szükség a felhasználó részéről.

### BE / KI gomb

A pumpa be- illetve kikapcsolásához 2 másodpercig nyomja le a BE/KI gombot, amíg meg nem hallja az indítási hangot.

A hosszú megnyomás a véletlen be- ill kikapcsolás elkerülését szolgálja.

A bekapcsolást követően a pumpa öntesztet hajt végre. Ha az eszköz használatra kész, az önteszt után a kezdőképernyő jelenik meg.

## BEKAPCSOLÁS ELŐTT - Mit találunk a pumpán?

### Kezdőképernyő gomb

A kezdőképernyő gomb megnyomásával egyszerűen visszatérhet a nyitó képernyőhöz.

### Riasztás némítása gomb

Riasztás esetén a gomb megnyomásával idő nyerhető: a riasztás hangját két percig elnémítja a helyzet nyugodt kezeléséhez.

### Információ gomb

A gomb információt ad a pumpa aktuális állapotáról az adott időben.



Példák:

- Futó üzemmódban információt a terápia státuszáról.
- Szüneteltető üzemmódban javaslatot ad a terápia beprogramozására a kiválasztott terápiától függően.
- Riasztási állapotban lehetséges megoldási javaslatot ad a jelzett riasztásra vonatkozóan.

## BEKAPCSOLÁS ELŐTT - Mit találunk a pumpán?



### Start / Szünet gomb

Elindítja vagy szünetelteti a beprogramozott terápiát

### Feltölt gomb

Két másodpercig tartsa nyomva a gombot a töltés elindításához, a gomb ismételt megnyomásával a töltés leállítható.

### Beállít gomb

Itt található a fő menu, ahol a pumpa alapbeállításai elvégezhetők.

### Terápia gomb

Itt állíthatók be a BEÁLLÍTÁS menüpont alatt engedélyezett terápiás módok adatai.

#### Beállítható terápiás módok:

- Dózis-sebesség
- Sebesség
- Szakaszos

## BEKAPCSOLÁS ELŐTT - Mit találunk a pumpán?



### Beállít gomb

Itt található a fő menu,  
ahol a pumpa alapbeállításai  
elvégezhetők.

### Beállít gombról elérhető almenüpontok

1. választható terápiák
2. terápia testreszabása
  - ✓ terápia 1
  - ✓ terápia 2
  - ✓ terápia 3
3. terápia beállításának zárása
4. betegadat nullázása
5. hang
6. kijelző
7. dátum és idő
8. nyelv
9. információ a pumpáról

## BEKAPCSOLÁS ELŐTT - Mit találunk a pumpán?



### Terápia gomb

Itt állíthatók be a BEÁLLÍTÁS menüpont alatt engedélyezett terápiais módok adatai.

#### Engedélyezhető terápiais módok:

- DÓZIS-SEBESSÉG Beállítható a volumen (ml) és beállítható a sebesség (ml/h)
- SEBESSÉG: Beállítható a sebesség (ml/h), viszont a volumen nem állítható.
- SZAKASZOS: Beállítható a teljes dózis (napi teljes adag ml-ben), dózis (adagok darabszáma), sebesség (ml/h) és a szünet ideje (óra-perc)

## BEKAPCSOLÁS ELŐTT - Mit találunk a pumpán?



PUHA gomb 1

PUHA gomb 2

PUHA gomb 3

A PUHA – jelzés nélküli - gombok a képernyőn megjelenő szöveghez kapcsolódnak.

A puha gombok a képernyőn megjelenő funkcióra vonatkoznak. A funkció gombok csak akkor aktívak, ha az adott szimbólumok: > < + - ◀ ▶ ▲ ▼ megjelennek mellette.

Ha a szimbólumok nem jelennek meg, akkor a gomb inaktív.