


BEKAPCSOLÁS UTÁN - Mit mutat a kezdőképernyő?

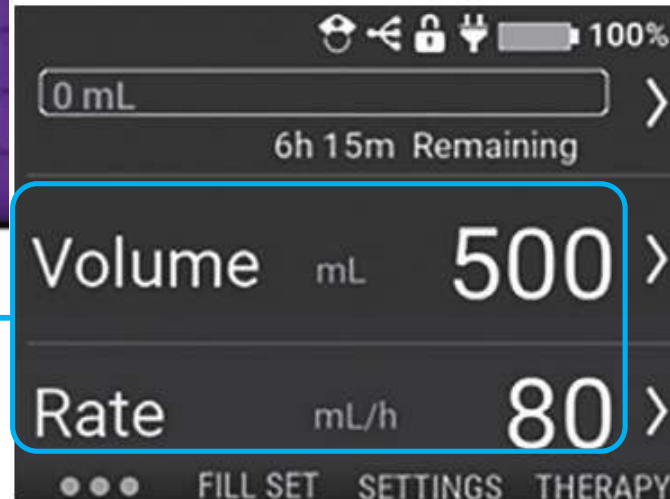


A kiválasztott Terápia beállításai

A kezdőképernyő a kiválasztott Terápia beállításait mutatja:

- DÓZIS/SEBESSÉG vagy
- SEBESSÉG vagy
- SZAKASZOS beállítások.

BEKAPCSOLÁS UTÁN - Mit mutat a kezdőképernyő?

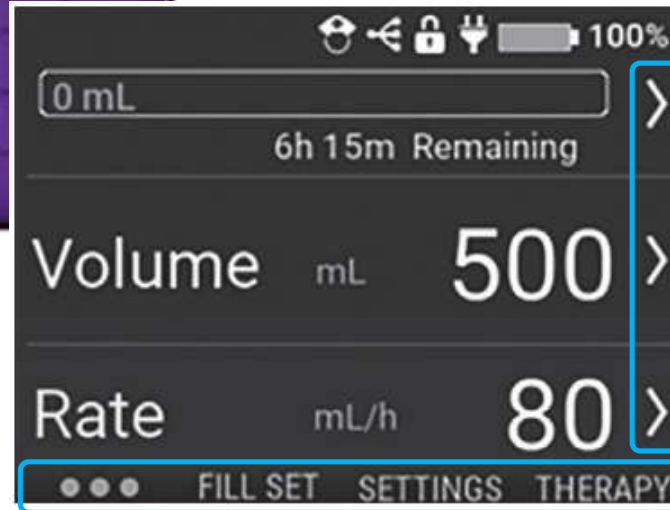


PUHA gombok
aktívak

Navigációs gombok
aktívak

A képernyő vizuálisan jelzi, hogy a navigációs és a választó gombok aktívak.


BEKAPCSOLÁS UTÁN - Mit mutat a kezdőképernyő?

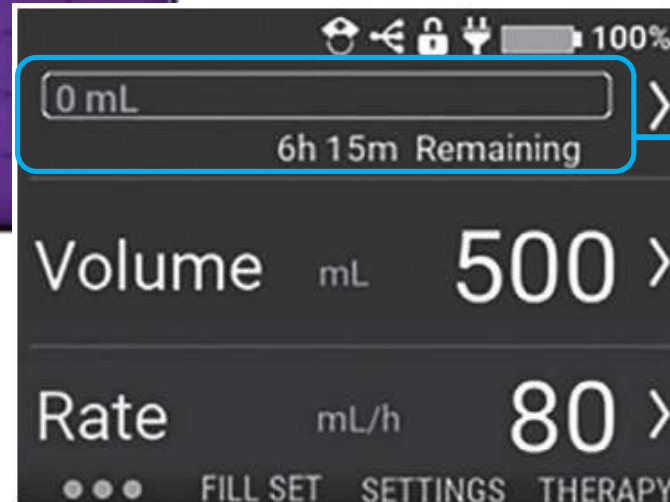

Folyamatjelző sáv

Aktuális tájékoztatást ad a beadott mennyiségről (ml) és a még hátralévő időről.

BEKAPCSOLÁS UTÁN - Mit mutat a kezdőképernyő?

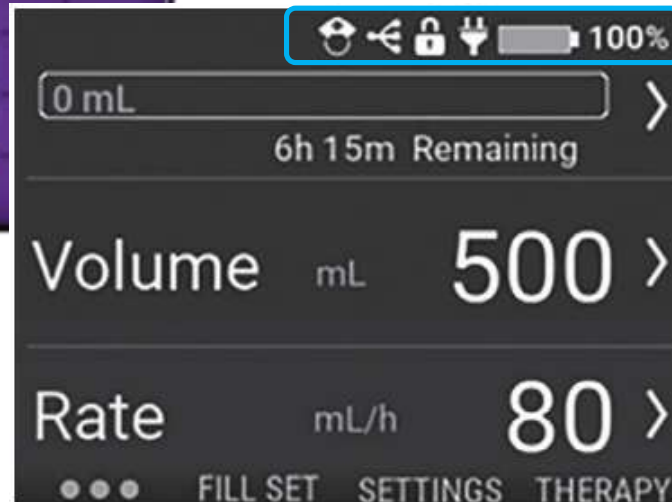

Állapotsor

Az állapotsor ikonjai gyors tájékoztatást adnak a pumpa jelenlegi állapotáról:

- Ápolóhívó kábel csatlakoztatva
- Adatkábel csatlakoztatva
- Terápia lezárt állapotban
- Hálózatra csatlakoztatva
- Töltöttség szintje